

Liebe Schüler*innen,

die Schulen sind wieder geöffnet. Wir möchten, dass sich niemand mit dem Coronavirus ansteckt. Deshalb bieten wir wöchentlich einen kostenlosen Test für Schüler*innen an.

Die neuen Tests sind einfach zu bedienen. Die Testdurchführung tut nicht weh und ist nicht unangenehm. Für den Test muss man mit einem Stäbchen leicht in der Nase bohren – aber nicht tief.

Bei den Tests handelt es sich um Schnelltests. Sie müssen nicht lange auf das Ergebnis warten. Die Tests wurden von Experten geprüft und zugelassen.

Sie führen den Test selbst durch. Ihre Lehrer*innen gehen mit Ihnen die einzelnen Schritte durch. Dabei ist es wichtig, den Ansagen genau zu folgen. Sonst besteht die Gefahr, dass der Test kein gültiges Ergebnis anzeigen kann. Es kann passieren, dass man bei der Einführung des Tupfers in die Nase niesen muss. Halten Sie ein Taschentuch parat.

Auf diesem Video wird der gesamte Testvorgang vorgestellt („CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test“ von Siemens)


<https://www.youtube.com/watch?v=b11L1odMNbk&t=53s>

Testanleitung für Schüler*innen


1. Die Fenster werden geöffnet.
2. Legen Sie ein saugfähiges Tuch vor sich auf die Tischplatte.
3. Desinfizieren Sie sich Ihre Hände vor Testdurchführung.
3. Befestigen Sie das Teströhrchen mit einer Wäscheklammer. Es muss stabil auf ihrem Tisch stehen. Ihre Lehrer*in zeigt es Ihnen.



4. Ihre Lehrer*in gibt 10 Tropfen der Pufferlösung in das Röhrchen.
5. Öffnen Sie die Tupferverpackung an der angegebenen Stelle. Ziehen Sie den Tupfer an seinem Kunststoffende aus der Verpackung. Berühren Sie **nicht** die saugfähige Tupferspitze.

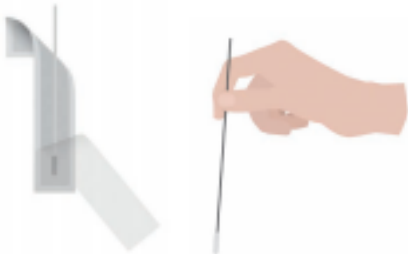

6. Führen Sie die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in Ihr linkes Nasenloch ein. Stellen Sie sicher, dass sich die gesamte Tupferspitze in Ihrem Nasenloch befindet (2 – 4 cm tief). **Führen Sie den Tupfer nicht weiter ein, wenn Sie einen Widerstand spüren.**
7. Rollen Sie den Tupfer mindestens 5-mal gegen die Innenseite Ihres Nasenlochs. Achten Sie auf guten Kontakt zwischen dem Tupfer und der Innenseite Ihres Nasenlochs.

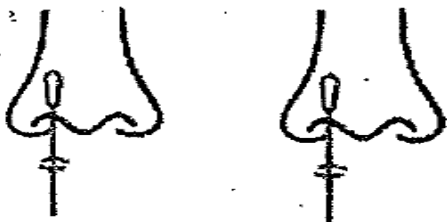

8. Entfernen Sie den Tupfer und führen Sie ihn in Ihr rechtes Nasenloch ein. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 in Ihrem rechten Nasenloch.
9. Entfernen Sie den Tupfer aus Ihrem Nasenloch und führen Sie ihn in das vorbereitete Röhrchen in der Arbeitsstation ein.
10. Mischen Sie gut, indem Sie den Tupfer mindestens 6-mal rollen und dabei den Kopf des Tupfers gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens drücken.
11. Starten Sie den Timer. Lassen Sie den Tupfer für 1 Minute im Röhrchen.



1 Minute

12. Drücken Sie das Röhrchen mehrmals von außen zusammen. Versuchen Sie, so viel Probenlösung wie möglich aus dem Tupfer zu lösen.




13. Entfernen Sie den Tupfer und legen Sie diesen in/auf die Verpackungsfolie vor sich.
14. Setzen Sie die im Selbsttest-Set enthaltene Kappe auf das Röhrchen und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
15. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Beutel und legen Sie diese auf die saubere Papiertuch-Oberfläche.




16. Geben Sie 4 Tropfen der Probenlösung in die Probenvertiefung "S" der Testkassette, indem Sie das Röhrchen leicht zusammendrücken.

15. Starten Sie den Timer und warten Sie 15 Minuten. Es ist wichtig, die Ergebnisse nach 15 Minuten abzulesen.

16. Lesen Sie Ihre Ergebnisse ab. Der Teststreifen darf **nicht** mitgenommen werden.

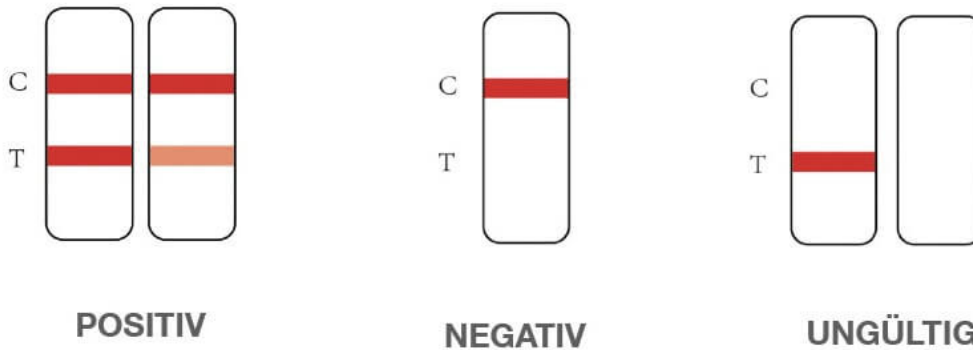

17. Die Lehrkraft notiert alle Ergebnisse.

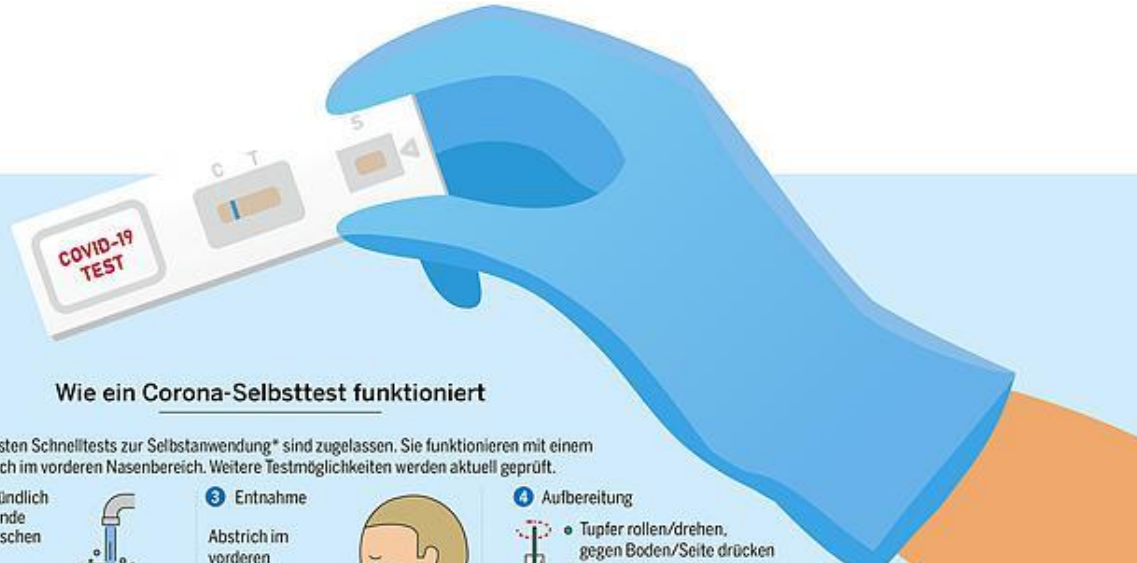


Wie ein Corona-Selbsttest funktioniert


Die ersten Schnelltests zur Selbstanwendung* sind zugelassen. Sie funktionieren mit einem Abstrich im vorderen Nasenbereich. Weitere Testmöglichkeiten werden aktuell geprüft.

- 1** Gründlich Hände waschen
- 2** Vorbereitung
 - etwa 10 Tropfen der mitgelieferten Flüssigkeit in das Röhrchen geben
 - senkrecht aufstellen
- 3** Entnahme
 - Abstrich im vorderen Nasenbereich
 - Tupfer 2–4 cm in ein Nasenloch einführen
 - mit Drehbewegung über die Schleimhaut streichen
 - mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen
- 4** Aufbereitung
 - Tupfer rollen/drehen, gegen Boden/Seite drücken
 - Tupfer gewisse Zeit im Röhrchen lassen
 - Tupfer entnehmen, Flüssigkeit im Röhrchen belassen
 - Röhrchen verschließen
- 5** Ergebnis auslesen
 - Röhrchen umdrehen und Tropfen in Probenvertiefung geben
 - Warten


POSITIV



NEGATIV

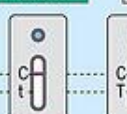

UNGÜLTIG

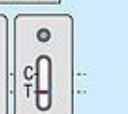

HSI Grafik/Logo, Quelle: Siemens Healthineers, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
*Herstellereingaben zu u. a. Abstrichmethode, Mengen und Zeit beachten
Illustration: Zusama/stock.adobe.com

Bei einem positiven Ergebnis:

1. Sie gehen sofort in Absprache mit der Lehrkraft ins Schulbüro.
2. Dort erhalten Sie ein FFP2 Maske und ihr PoC Formular. Dies ist ein Formular, das Ihnen Ihr positives Schnelltestergebnis bestätigt.
(PoC Formular: Positiver Schnelltest-Meldeformular Schule)
3. Die Schule informiert das Gesundheitsamt, Ihren Ausbildungsbetrieb und ggf. Ihre Eltern.
4. Sie müssen **SOFORT** die Schule verlassen und sich in häusliche Isolierung begeben.
5. Bitte vereinbaren Sie eine PCR-Nachtestung bei Ihrer Hausärzt*in oder in einer Infektionssprechstunde. Diese ist kostenlos.